

EO - 150 : Fiche d'utilisation simplifiée





- 1 Ecran d'affichage
- 2 Module de ventilation
- 3 Pression proximale, valve et connecteurs de débit proximal
- 4 Station d'accueil du ventilateur
- 5 Port du circuit / Inspiratoire
- 6 Barre de menu / clavier



- 1 Entrée d'air et filtre hypoallergénique
- 2 Connecteur d'alimentation
- 3 Bouton VEILLE
- 4 Entrée O₂
- 5 Connecteur FiO₂ / SpO₂
- 6 Connecteur de l'alarme distante

Mise en marche / Arrêt :

- Appuyer sur  sur le clavier du panneau avant pour mettre le ventilateur sous tension. L'écran d'accueil s'affiche. Si l'écran d'accueil est éteint, appuyer sur le bouton veille jusqu'à son allumage avant d'allumer l'appareil.
- Pour éteindre l'appareil, appuyer sur  sur l'écran d'accueil jusqu'à ce que le cercle devienne rouge et valider l'extinction de l'appareil. Le ventilateur s'éteint et l'écran entre en veille.

Déverrouillage :

- Ouvrir le menu  puis maintenir le cadenas  jusqu'à ce qu'il devienne rouge et valider. Le menu clinique et les réglages sont désormais accessibles.


Accès aux réglages :


- Ouvrir le menu clinique pour accéder aux réglages. Depuis le menu clinique, cliquer sur  pour accéder aux paramètres circuit / patient.

Calibration :

- Une calibration circuit est à effectuer à chaque changement de circuit. Accéder à la calibration circuit depuis le menu « Calibration », ou en sélectionnant l'icône de calibration depuis les paramètres circuit / patient. Suivre les étapes affichées à l'écran pour procéder à la calibration.

Pré - réglages :

- Quatre programmes personnalisables peuvent être créés sur l'EO - 150. Accéder à la page des pré-réglages depuis le menu « Pré-réglages » ou en sélectionnant « Sauvegarder » depuis le menu clinique.
- Appuyer sur le nom du pré-réglage pour le modifier, et cliquer sur « Go » sur le clavier pour sauvegarder les changements.
- Sélectionner « Sauvegarder le mode actif » pour enregistrer les paramètres circuit, réglages et alarmes en cours dans le pré-réglage.
- Sélectionner  pour supprimer un pré-réglage.
- Sélectionner le pré-réglage à appliquer depuis l'écran d'accueil.

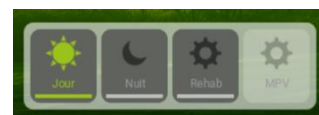

Récupération des données :

- Insérer une carte SD ou une clé USB dans le boîtier de récupération de données. Allumer le boîtier et attendre que la fin du clignotement du voyant Wifi.
- Accéder à l'onglet « Config. Tendances » du menu tendances et « Transfert ».
- Attendre la fin de l'enregistrement des données sur la carte SD ou la clé USB.

TENDANCES

Config. Tendances




Montages circuits :

- Simple branche à fuites :



- Simple branche à valve :

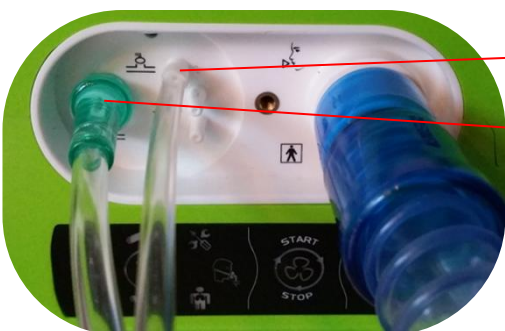

Sans capteur de débit proximal


- Valve expiratoire
- Pression proximale
- Capteur de débit (ligne bleue)
- Capteur de débit (ligne blanche)



Avec capteur de débit proximal

- Double branches :

Ligne bleue du capteur de débit au plus près du patient

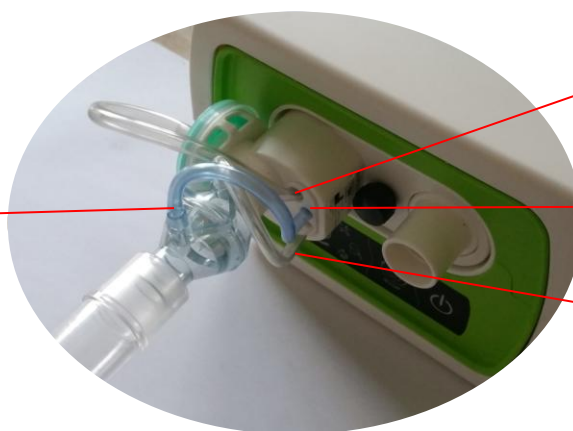

- Valve expiratoire
- Capteur de débit (ligne bleue)
- Capteur de débit (ligne blanche)